


วิธีการสวมใส่หน้ากาก 3M รุ่น 8822

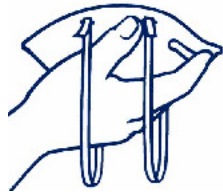

วางหน้ากากไว้บนฝ่ามือให้แถบอลูมิเนียมหันไปที่ปลายนิ้ว และปล่อยสายรัดศีรษะห้อยลงมา



วางหน้ากากไว้ใต้คาง และวางแถบอลูมิเนียมเหนือไว้บนดั้งจมูก



ดึงสายรัดศีรษะเส้นบนข้ามศีรษะ และคล้องไว้เหนือใบหู
ดึงสายรัดศีรษะเส้นล่างข้ามศีรษะ และคล้องไว้ที่ต้นคอ



ใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างกดแถบอลูมิเนียมเพื่อปรับความกระชับ และใช้มือปรับความกระชับรอบๆ หน้ากาก



ใช้ฝ่ามือสองมือปิดที่ผิวหน้ากาก และหายใจเข้า ถ้ามีลมเข้ารอบๆ หน้ากาก ให้ปรับความกระชับใหม่ จนไม่มีลมเข้ารอบๆ หน้ากาก